

# DOSIERTABELLE

## für das Instrumentendesinfektionsmittel

### Descogen®-I

#### Einwirkzeiten EWZ

Descogen®-I		bakterizid / levurozid		tuberkulozid	viruzid	sporizid	
Menge der gebrauchsfertigen Lösung	1,5 %	0,5 %	EWZ [1,5 %]	EWZ [0,5 %]	EWZ [1,5 %]	EWZ [1,5 %]	EWZ [1,5 %]
1 l	15 ml ( ≈15 g)	5 ml ( ≈5 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
2 l	30 ml ( ≈30 g)	10 ml ( ≈10 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
4 l	60 ml ( ≈60 g)	20 ml ( ≈20 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
8 l	120 ml ( ≈120 g)	40 ml ( ≈40 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
10 l	150 ml ( ≈150 g)	50 ml ( ≈50 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
20 l	300 ml ( ≈300 g)	100 ml ( ≈100 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min

Anwendung: Zuerst das Wasser einfüllen. Von der gewünschten Menge der gebrauchsfertigen Lösung (1. Spalte in der Tabelle) muss die Menge an Desinfektionsmittel abgezogen werden, um die tatsächliche Menge an Wasser zu erhalten (Bsp. 1 L gebrauchsfertige Lösung = 985 ml Wasser + 15 ml Desinfektionsmittel). Anschließend das Desinfektionsmittel hinzugeben. Benötigtes Granulat (30 ml ≈ 30 g) abwiegen oder mit dem Messlöffel (mit Skalierung, Gesamtvolumen 30 ml) abmessen. Mehrmals umrühren, bis sich das Granulat vollständig aufgelöst hat.

**Die gebrauchsfertige Lösung sollte arbeitstäglich frisch angesetzt werden.**

(Hinweis: kein heißes Wasser verwenden!)



**Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH, Deutschland**

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7, D-50259 Pulheim, Tel. +49 22 34 / 984 66-0, Fax +49 22 34 / 984 66-11  
info@antiseptica.com www.antiseptica.com

**Antiseptica chem.-pharm.-Produkte GmbH, Österreich**

Handelskai 388, A-1020 Wien, Tel. + 43 1 / 374 66 00, Fax + 43 1 / 374 66 00-66  
office@antiseptica.at www.antiseptica.at